


Metalplex doseringsprøyte

– enkel doseringsprøyte som egner seg når få dyr skal behandles

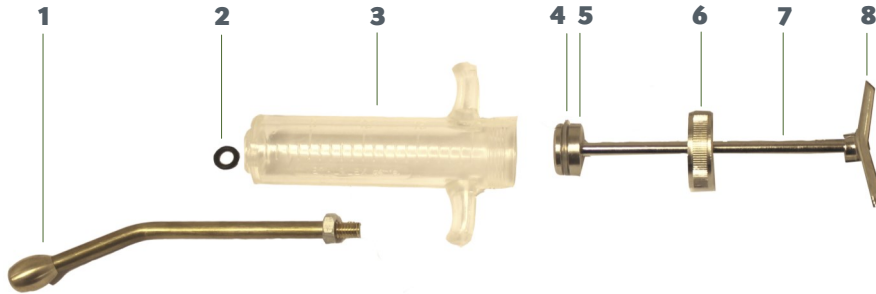

Deler

1. Munnstykke
2. Svart gummi-pakning
3. Sprøytesylinder
4. Stempelpakning
5. Stempel
6. Topplukk
7. Stempelarm
8. Håndtak

Vedlikeholdsanvisning

1. Sprøyta tåler sterilisasjon: kokende vann, autoklav tørrdestillasjon ved 150° C, alkohol og andre kald-destillasjonsmiddel.
2. Etter bruk må sprøyta renses med vann eller alkohol, og pakningen må smøres med silikonolje.
3. Bruk bare originaldeler beregnet for denne sprøyta. Dette gjelder særlig munnstykke og pakning.