



Att avlägsna plastdelen på svart Combi Junior Tång

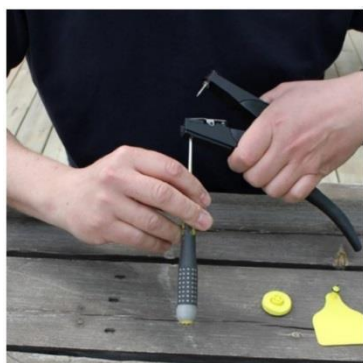


1. Använd exempelvis, en smal skruvmejsel för att dra ut plastdelen i Combi Junior-tången
2. Lägg i skruvmejseln i hålet i nedre delen av tången.

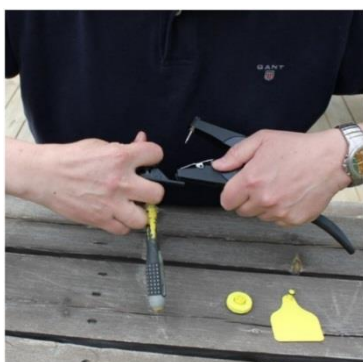

3. Ta ett stadigt grepp om både skruvmejsel och tång. Dra rakt ut så följer plastdelen med.



4. Nu kan du lägga i det elektroniska märket. Pilen på märkets baksida skall peka framåt. Den tjockare delen av märkets framsida skall ligga mellan tångens två nedre gafflar

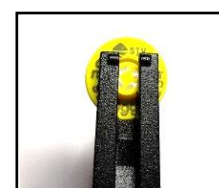

Undersida



5. Nu är märket färdigt att sätta i örat.

