



SenseHub[®]

Monteringsguide för Sensehub halstransponder

1. Börja så här. Notera att plastringarnas pilar pekar mot varandra och att änden på remmen har sin spets åt höger.



2. För in plastringarna ända fram till metallspännet och vikten till mitten av remmen. Trä in remmen i plastringen som på bilden.



3. Justera remmen så att innersta hålet hamnar ovanför spännet.



4. För ner plastringen mot vikten så att den låser vikten.



5. Trä remmen som på bilden.



6. Klart.



7.

Bra och effektiv support om SenseHub

Eftersom SenseHub är nätbaserat, är det enkelt för oss att ge dig den hjälp du behöver. Vi kan logga oss in i ditt system och rätta eventuella fel, utan att det medför något arbete för dig. Du får en bra support när du behöver det.

Support & kontakt SenseHub

Kundservice: 0510 – 20445

Jonas, sälj: 0510 – 484355

Magnus, support: 0510 – 484356

lmse@merck.com



www.stallmastaren.se/support-och-kontakt-om-sensehub

www.stallmastaren.se/aktivitetsmatning-sensehub